

სადეზინფექციო საშუალება (კონცენტრატი)

**აღწერა:**

**Diversey Oxivir Plus** განზავებადი ერთსაფეხურიანი სადეზინფექციო საშუალება, ჰიდროთერაპიული აბაზანის გამწმენდი და სადეზინფექციო საშუალება, ფორმულირებული წყალბადის ზეჟანგის ტექნოლოგიით, ეკოლოგიურად სერტიფიცირებული.

**ძირითადი მახასიათებლები და უპირატესობები:**

- წყალბადის ზეჟანგზე დაფუძნებული სწრაფი სადეზინფექციო საშუალება (კონცენტრატი).
- არაკრიტიკული სამედიცინო მოწყობილობების, აღჭურვილობისა და მყარი არაფლოროვანი ზედაპირების გაწმენდა და დეზინფექცია.
- ეფექტურად ებრძვის ვირუსებს, როგორცაა: HIV-1, AIDS, Influenza A, Salmonella, MRSA და VRE.
- ეფექტურია ბაქტერიების, ვირუსების, ტუბერკულოზის, სოკოს წინააღმდეგ.
- სურნელოვანი დანამატების გარეშე.
- უზრუნველყოფს სწრაფ და ეფექტურ წმენდას და არ აღიზიანებს თვალებს და კანს გამოყენებისას.

**გამოყენების წესები:**

**Diversey Oxivir Plus** არის ერთსაფეხურიანი სადეზინფექციო საშუალება, რომელიც გამოიყენება კედლებზე, უჟანგავი ფოლადზე, ფაიფურზე, პლასტმასის ზედაპირებზე, ჰიდროთერაპიის ტუბებში და სხვა მძიმე, არაფლოროვანი ზედაპირებზე.

- ბაქტერიციდული და ვირუსიციდური, ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტული ბაქტერიების ჩათვლით - გაზავების შემდეგ (პროპორცია 1:40 ზე) დაასხურეთ ზედაპირზე და დააყოვნეთ 5 წუთი.
- ზოგადი დეზინფექციისათვის, ზედაპირების სანიტარიზაციისათვის, გააზავეთ 1:128 პროპორციით, დაასხურეთ და დააყოვნეთ 30 წამი.
- გაწმინდეთ ზედაპირი ქსოვილით, საჭიროებისამებრ გადარეცხეთ წყლით.

**ტექნიკური მონაცემები**

**გარეგნული ფორმა:** ღია გამჭირვალე სითხე

**Ph ( კონცენტრატის) - 0,8**

ზემოთნახსენები მონაცემები წარმოადგენენ ტიპიურ სიდიდეებს და სპეციფიკაციებად არ უნდა განიხილებოდნენ.

### ინფორმაცია უსაფრთხო დამუშავებასა და შენახვაზე

შეინახეთ თავისივე კონტეინერში დახურულ მდგომარეობაში ან (სადაც შესაძლებელია) სპეც. განკუთვნილ ცისტერნაში, მთავრად მაღალ ტემპერატურას. პროდუქტის გამოყენებისა და განთავსების შესახებ სრული ინსტრუქციის ნახვა შესაძლებელია არსებითი უსაფრთხოების მონაცემების ფურცელზე.

მოცულობები: 20 ლიტრი;

