



საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ლ. საყვარელიძის სახელობის

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

National center for Disease Control & Public Health



KA030651411961420

საქართველო, ქ. თბილისი, 0198, კახეთის გზატკეცილი N99; ტელ: (+995 32) 2192595; ცხელი ხაზი: 116001
Kakheti Highway N99, 0198, Tbilisi, Georgia; Tel: (995-32) 2192595; Hot line: 116001; E-mail: ncdc@ncdc.ge

#06/1966

28 / აპრილი / 2020 წ.

შპს „კლინტექ“-ის დირექტორს
ბატონ ვლადიმერ ჭელიძეს

ბატონო ვლადიმერ,

სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში განხილულ იქნა თქვენი განცხადება და წარმოდგენილი დოკუმენტები შპს „კლინტექ“-ის მიერ წარმოდგენილ სადებიზფექციო საშუალება „ზომა სპექტრი“-ს რეგისტრაციის შესახებ: 1. ინფორმაცია სადებიზფექციო საშუალების გამოყენების სფეროს, წესებისა და პირობების შესახებ. 2. უსაფრთხოების დამადასტურებელი დოკუმენტები. 3. დასკვნა საშუალების მადეზინფიცირებელი ეფექტის შესახებ. ასევე გაცნობებთ, რომ ბაქტერიებისა და ვირუსების ეროვნული კოლექციის (საცავი) ლაბორატორიაში, თქვენი განცხადების საფუძველზე, შემოწმებულ იქნა სადებიზფექციო საშუალება „ზომა სპექტრი“-ს მადეზინფიცირებელი ეფექტი *S.aureus* ATCC 25923, *P.aeruginosa* ATCC 27853, *Enterococcus hirae* ATCC 10541, *B.subtilis* ATCC 6633 და *B.cereus* ATCC 4342) შტამებით. სადებიზფექციო საშუალება ანოტაციებში მითითებული ექსპოზიციით უზრუნველყოფს ზემოაღნიშნული მიკრობების გაუვნებლობას და შესაძლებელია მისი გამოყენება მეთოდური რეკომენდაციის შესაბამისად.

გამოყენების მეთოდი

„ზომა სპექტრი“ წარმოადგენს ერთგვაროვან გამჭვირვალე კონცენტრირებულ სითხეს სპეციფიკური სუნით, რომელიც კარგად იხსნება წყალში. საშუალებას სადებიზფექციოსთან ერთად ახასიათებს კარგი გამრეცხი უნარი, დეზოდორაციის და სხვა. არ იწვევს სხვადასხვა მასალისაგან და ლითონისაგან დამზადებული ხედაპირების დაზიანებას და კოროზიას, ასევე არ აზიანებს თერმომდგრად და არათერმომდგრადი მასალისაგან დამზადებული სამედიცინო ხელსაწყო იარაღების ზედაპირებს. არ ახდენს ორგანული წარმოშობის მქონე დაბინძურების ფიქსირებას. არ ტოვებს ლაქებს და ნალექებს. აცილებს დაბინძურებას, ბიოლოგიურ სითხეებს და სხვა. მწარმოებლის მეთოდური რეკომენდაციის შესაბამისად, ხელსაწყო-იარაღების დებიზფექციას აწარმოებენ ხსნარში ჩაძირვით, მოსხურებით, განმენდით. ასაწყობ ნაკეთობებს ხსნარში ათავსებენ დამლილ მდგომარეობაში. დებიზფექციის დროს არხები და ღრუები უნდა იყოს სავსე ხსნარით (ჰაერის საცობების გარეშე). სადებიზფექციო ხსნარი ზედაპირს უნდა ფარავდეს არა ნაკლებ 2 სმ-სა. საშუალო ხსნარის რაოდენობა გამოითვლება საშუალოს მოცულობისა და ცალკეული სამედიცინო დანიშნულების საგნებისა ან კომპლექტების რაოდენობის საფუძველზე, იმის გათვალისწინებით, რომ საგანი მთლიანად უნდა დაიფაროს და მოთავსდეს სადებიზფექციო ხსნარში. „ზომა სპექტრი“-ს ხსნარის გამოყენებით კრიტიკული, ნახევრადკრიტიკული და არაკრიტიკული ჯგუფის ობიექტების სამედიცინო/სტომატოლოგიური ინსტრუმენტებისა და მოწყობილობების დებიზფექციის, წინასატერილიზაციო დამუშავებისა და სტერილიზაციის რეჟიმები დეტალურად მითითებულია მწარმოებლის მეთოდურ რეკომენდაციებში.

უსაფრთხოების წესები

„ზომა სპექტრი“-ს გამოყენება დაუშვებელია სადებიზფექციო საშუალების ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ. სადებიზფექციო ხსნარის გამოყენებისას აუცილებელია სამედიცინო პერსონალმა გაეცნოს ეტიკეტს და ინფორმაციას პროდუქტის შესახებ, გამოიყენოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები და დაიცვას უსაფრთხოების წესები. არ იწვევს დასამუშავებელი ზედაპირების კოროზიას.

შეფუთვა და ეტიკეტირება, შენახვის ვადები და პირობები

„ზომა სპექტრი“ დაფასოებულია ქარხნული წესით სხვადასხვა მოცულობის ბოთლებში. შენახვის ვადა მითითებულია ეტიკეტზე 36 თვე. ინახება მშრალ 0°C დან +40°C-მდე, მწარმოებლის მიერ შეფუთვით სითბოსა და აალების, სინათლისათვის მიუწვდომელ ადგილზე.

მწარმოებელი

შპს „კლინტექ“-ი, ქ. თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი 68ა

ტელ: +995595222787;

ელ-ფოსტა: jk@zoma.ge

ჰიგიენური დასკვნა

„ზომა სპექტრი“ წარმოადგენს სადებიზინფექციო საშუალებას, რომელიც გამოიყენება კრიტიკული (მ.შ.სტომატოლოგიური, დრეკადი ენდოსკოპების ჩათვლით), ნახევრადკრიტიკული და არაკრიტიკული ჯგუფის სამედიცინო დანიშნულების ხელსაწყო/იარაღებისა და აპარატურის დებიზინფექციის, მაღალი დონის დებიზინფექციის, წინასასტერილიზაციო დამუშავებისა და სტერილიზაციისათვის სამედიცინო პროფილაქტიკურ დაწესებულებებში, ასევე გამოიყენება საზოგადოებრივი დანიშნულების, საგანმანათლებლო, ფარმაცევტულ, პენიტენციური სისტემის, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი დაწესებულებების, კომუნალური მომსახურების ობიექტებში მწარმოებლის მეთოდური რეკომენდაციების შესაბამისად.

პატივისცემით,

გენერალური დირექტორის მოადგილე

ხელმოწერა/
შტამპი
ელმოწერა



ირმა ხონელიძე