



EcoSafe

მაღალეფექტური სამედიცინო სადეზინფექციო საშუალება

პროდუქტის აღწერა

EcoSafe - ეფექტური დაცვა ინფექციებისგან

EcoSafe წარმოადგენს მაღალეფექტურ, ფართო სპექტრის ზედაპირების საწმენდ და სადეზინფექციო საშუალებას. პრეპარატი ხასიათდება კომბინირებული ფორმულით, რომელიც უზრუნველყოფს მიკროორგანიზმების ფართო სპექტრის ელიმინაციას და ამავედროულად ეფექტურად ამორებს ორგანულ და არაორგანულ დაბინძურებას.

ქიმიური შემადგენლობა

აქტიური ინგრედიენტი	კონცენტრაცია (W/W)
ბენზალკონიუმის ქლორიდი	20.0%
დიდეცილდიმეთილამონიუმის ქლორიდი	8.0%
1,3-პროპანედიამინი, N-(3-ამინოპროპილ)-N-დოდეცილი	10.0%
ცხიმოვანი ალკოჰოლები, C13-15-განშტოებული და ხაზოვანი, ბუტოქსილირებული ეთოქსილირებული	2.5%
ალკოჰოლები, C13-15, განშტოებული და ხაზოვანი, ეთოქსილირებული	2.5%
იზოპროპილის სპირტი	10.0%
დეიონიზებული წყალი	100%-მდე

ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლები

ფერი	გამჭვირვალე, უფერო ან ღია მოყვითალო სითხე
სიმკვრივე 20°C-ზე	0.95 გ/მლ
pH	11.5 ± 0.5

მიკრობიოლოგიური ეფექტურობა

EcoSafe ხასიათდება ძლიერი ანტიმიკრობული თვისებებით, ეფექტურია როგორც ბაქტერიების, ისე სოკოებისა წინააღმდეგ, ინაქტივირებს გარსიან და გარკვეულ უგარსო ვირუსებს, ეფექტურია

მიკობაქტერიების წინააღმდეგ. მაღალი კონცენტრაციებისა და შესაბამისი ექსპოზიციის პირობებში ეფექტურად მოქმედებს ზოგიერთი ბაქტერიული სპორის წინააღმდეგ, შლის უკვე ჩამოყალიბებულ ბიოფილმებს და ხელს უშლის ახალი ბიოფილმების ფორმირებას.

EcoSafe გამოიყენება წყალგამძლე დიდი ზედაპირების დასამუშავებლად სამედიცინო სექტორში, საზოგადოებრივ დაწესებულებებში, სასტუმროებში, ფარმაცევტულ და კოსმეტიკურ სფეროში.

გამოყენების რეჟიმები

მოქმედების სპექტრი	ექსპოზიცია	სამუშაო ხსნარის კონცენტრაცია
ბაქტერიციდული, მოქმედებს როგორც გრამ-დადებით, ისე გრამ-უარყოფით ბაქტერიებზე, მათ შორის მულტირეზისტენტულ შტამებზე (MRSA, VRE, CRE)	30 წთ	0,50% 5მლ/1ლ
	20 წთ	1% (10 მლ/ლ)
	10 წთ	2% 20მლ/1ლ
ტუბერკულოციდული	10 წთ	2% 20მლ/1ლ
ფუნგიციდული	10 წთ	2% 20მლ/1ლ
	20წთ	1% (10 მლ/ლ)
ვირუსიციდული, , ინკაფსულირებული ვირუსები (HIV, HBV, HCV ჩათვლით)	10 წთ	2% 20მლ/1ლ
სპოროციდული მოქმედება (C. difficile და სხვა სპორები)	20 წთ	2% 20მლ/1ლ
	10 წთ	1% (10 მლ/ლ)
ბიოფილმების წინააღმდეგ მოქმედება	20 წთ	2% 200 მლ/10ლ

	30 წთ	1%(10 მლ/ლ)
--	-------	--------------

გამოყენების მეთოდი

მომზადეთ ხსნარი სასურველი კონცენტრაციით.

დაამუშავეთ ზედაპირი მომზადებული სამუშაო ხსნარით გაჟღენთილი საწმენდი მასალით ან გაასხურეთ ზედაპირზე. უზრუნველყავით ზედაპირის სისველე რეკომენდებული ექსპოზიციის მთელი პერიოდის განმავლობაში

საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია ექსპოზიციის პერიოდის შემდეგ გავლება წყლით.

უსაფრთხოების ზომები

- გამოიყენეთ დამცავი საშუალებები (ხელთათმანები, დამცავი სათვალე) ხსნართან მუშაობისას
- არ შეუიროთ სხვა სადეზინფექციო ან საწმენდ საშუალებებს
- გამოიყენეთ ვენტილირებულ გარემოში
- თვალში მოხვედრისას დაუყოვნებლივ ჩამოიბანეთ დიდი რაოდენობით წყლით და მიმართეთ ექიმს
- კანზე მოხვედრისას ჩამოიბანეთ წყლით და საპნით
- შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას

შეფუთვა და ვადები

- შეფუთვის ზომები: 1ლ , 5ლ
- შეინახეთ მჭიდროდ დახურულ ტარაში 5-25°C
- დაიცავით მზის პირდაპირი სხივებისგან.
- ვარგისიანობის ვადა: 3 წელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

- შპს ზომა ჯორჯია
- მისამართი: თბილისი, ფონიჭალა, რუსთავის გზატკეცილი 68
- ტელ: +995 (595) 608 778
- ვებ-გვერდი: www.zoma.ge
- ელ-ფოსტა: info@zoma.ge